

# INSTRUCCIONES



**1**  
**Apoye la cabeza de la víctima contra una superficie.**



**2**  
**Coloque Dechoker teniendo en cuenta que el tubo depresor quede encima de la lengua de la víctima.**



**3**  
**Presione firmemente la mascarilla contra la cara de la víctima.**



**4**  
**Tire rápidamente del émbolo hasta eliminar la obstrucción. Si la víctima está consciente, retírelo cada 3 segundos y vuelva a intertarlo.**

#### Recomendaciones:

- Lea detenidamente las instrucciones de uso del dispositivo
- Puede ser aplicado de pie o sentado, o incluso ser auto-aplicado a uno mismo.
- Para asegurar un sellado completo de la mascarilla sobre el rostro, se agradece un apoyo posterior (por ejemplo, contra el suelo o una pared).
- Se aconseja tener su Dechoker en un lugar de rápido acceso, cerca de los sitios con más riesgo, como el comedor.

# DATOS & PRESTACIONES



## BENEFICIOS

¿POR QUÉ TENER UN DECHOKER?  
PORQUE TE PUEDE SALVAR LA VIDA.

ES MUY FÁCIL Y RÁPIDO.  
ACTÚA EN SEGUNDOS.

DISPOSITIVO DE ALTA CALIDAD,  
FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS  
CON MARCA CE Y REGISTRO  
SANITARIO EN ESPAÑA.

DESDE 12 MESES, EN NIÑOS, EN  
MUJERES EMBARAZADAS, EN  
ADULTOS, EN ANCIANOS.

AUTOAPLICABLE.  
ÚTIL INCLUSO SI NO HAY OTRAS  
PERSONAS Y PARA INDIVIDUOS CON  
MOVILIDAD REDUCIDA.

PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.

VARIOS INTENTOS SEGUROS  
(CÁMARA RETENCIÓN Y VÁLVULA DE  
E)

EN CASA, EN UN RESTAURANTE,  
EN CUALQUIER LUGAR.  
SIEMPRE A MANO.

## ÚNICO

NO SE NECESITA FUERZA NI  
FORMACIÓN ESPECIAL.  
NO HACE FALTA SER PERSONAL  
SANITARIO. BASTA CON ENTENDER  
LAS INSTRUCCIONES.

## FUNDAMENTALES

### DATOS & PRESTACIONES • DIFERENCIAL • ORIGINAL

- No se necesita apenas fuerza para usarlo gracias a su sistema de émbolo y lubricante. Con muy poca fuerza se despliega y actúa.
- El pequeño tubo que tiene Dechoker en la mascarilla es necesario para deprimir la lengua y que ésta no estorbe en la succión. Las muescas del final sirven para que la lengua no pueda colapsar el dispositivo.
- Este depresor, además, evita que se junten las mejillas al succionar, manteniéndose entre ellas y facilitando una vía libre directa para mayor efectividad.
- Dechoker se puede usar en bebés desde 12 meses (9 Kg).
- Dechoker tiene una cámara de recepción (cilindro) para extraer y retener materiales sólidos y líquidos (como secreciones).
- Está libre de látex.
- No hay que montarlo. Está diseñado para ahorrar tiempo en una emergencia tiempo-dependiente. Es de una sola pieza. Listo para usar.
- Dechoker tiene Código Nacional de Farmacia.
- Múltiples centros hospitalarios, gobiernos y organizaciones de seguros médicos han incorporado Dechoker en sus instituciones.
- Dechoker ya está protegiendo a decenas de miles de personas en España y en el mundo.



**CADA SEGUNDO  
CUENTA**



**NO PASES UN MAL  
TRAGO**



**2336 FALLECIMIENTOS  
AL AÑO POR  
ATRAGANTAMIENTO**



**1 MUERTE  
CADA 4 HORAS**