



weelko



HighTech Sauna Air WKB002

Pressotherapy + Thermotherapy

HighTech Sauna Air WKB002


Pressotherapy + Thermotherapy

Nota: Los equipos vienen protegidos con un plástico adhesivo muy delgado, que protege la pantalla de posibles rayones durante el embalaje, y generalmente se marca, se puede retirar el mismo una vez desembalado.

EQUIPO

- Botas de presoterapia derecha e izquierda.
- Pierna derecha e izquierda
- Cintura
- Brazos derechos e izquierdo
- Manta, cables y tubos de aire.
- Unidad principal.



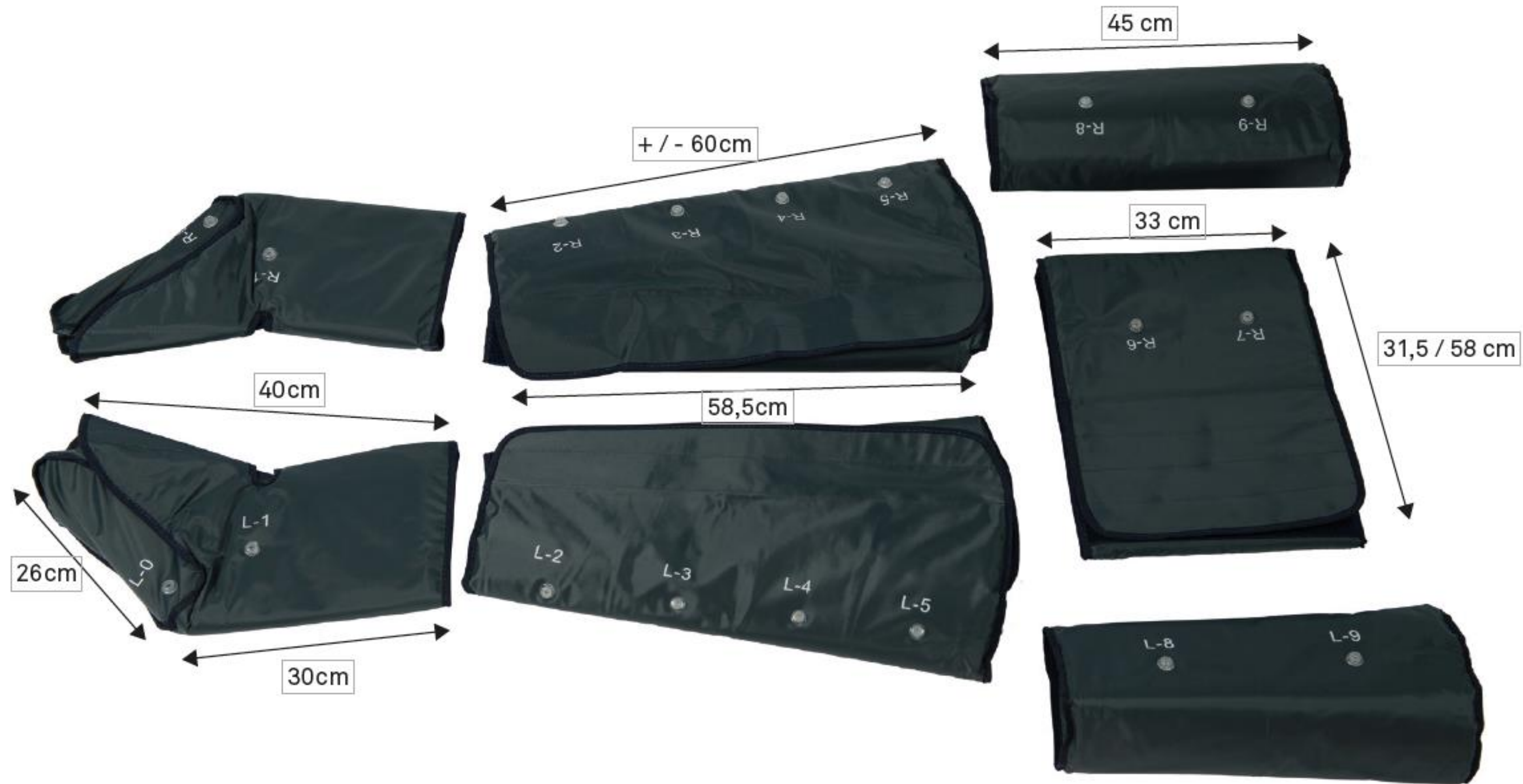

Nuestro WKB002, es un equipo digital de belleza con pantalla táctil que combina 2 funciones: termoterapia y presoterapia. Traje compuesto de botas, piernas, faja abdominal y brazos. Además, incluye manta para almacenar los cables. Es Ideal para mejorar la circulación, facilitar la eliminación de grasas mediante la activación del drenaje linfático, así como la oxigenación celular y la relajación muscular. Será nuestro principal aliado en los tratamientos corporales.



HighTech Sauna Air WKB002

Pressotherapy + Thermotherapy

HighTech Sauna Air

WKB002

Pressotherapy + Thermotherapy

Para conectar el equipo correctamente, deberá hacerse en el panel trasero, que de izquierda a derecha irá de la siguiente forma:

- Conecte el cable de alimentación o suministro de energía (200-240V 50Hz).
- Conecte correctamente los tubos en el panel trasero. Siga las indicaciones numéricas. Los cables finos del 1 al 5 son para la función termoterapia y los cables gruesos son para la presoterapia (3 conexiones).
- Coloque la manta con los cables en una superficie plana para que el cliente pueda tumbarse. Proteja la manta con un papel desechable para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.
- Envuelva las prendas alrededor del cuerpo del usuario y ajústelo. Recuerde utilizar un traje desechable debajo del traje de la presoterapia, e higienizar luego de ser utilizada.





Para encender el equipo encontraremos un botón en el panel frontal, y luego hacemos clic en el logo Weelko de la pantalla para proceder a seleccionar los menús deseados. Escoja la función “pressotherapy” para la presoterapia y “far infrared” si quiere utilizar la función termoterapia.

La presoterapia

Es una técnica, no invasiva, ni dolorosa, coadyuvante en los tratamientos estéticos, donde se busca estimular sistema linfático y circulatorio, siendo así un excelente complemento en cabina. Su sistema de compresión está diseñado para aumentar el flujo venoso y linfático, mejorando el retorno venoso. Nos ayuda a promover las funciones naturales de limpieza de toxinas del cuerpo. La revitalización y oxigenación son sin duda una consecuencia del tratamiento con nuestro equipo, consiguiendo adelgazar y redefinir las piernas, la cintura y los brazos mientras mejora el tono de la piel. La cantidad de sesiones puede ser de 2 a 3 por semana, y dependerá del tipo de tratamiento y los resultados que se quieran conseguir, por eso la evaluación previa del cliente es muy importante. Este es un tratamiento seguro, relajante y placentero. Nuestro WKB002 además cuenta con Termoterapia, que hace una excelente combinación.

Para comenzar debemos seleccionar el tipo de tratamiento a realizar:

Pressotherapy: activa la presoterapia.


Far infrared: activa la termoterapia.

Mode: en la función de presoterapia, el menú “MODE” permite escoger uno de los cuatro programas A, B, C, D.

Level: se regula la intensidad de la presión del tratamiento, dosificada en tres niveles, bajo, medio, alto. Siempre se trabajará a tolerancia del cliente, comenzando de menos a más para evitar daños, y comprobando que la intensidad a lo largo del tratamiento es la adecuada.

Time: nos determina el tiempo de tratamiento, 30-45min. máx. recomendado.


Play y Pause: para comenzar a emitir o pausar el equipo cuando lo necesitemos.

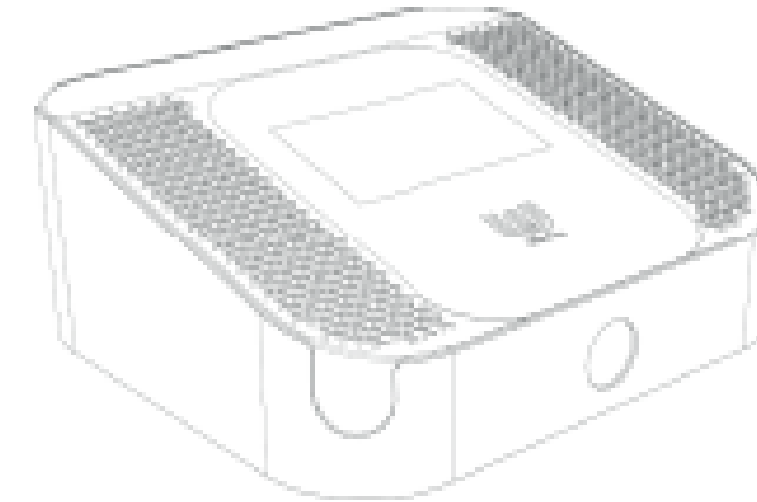

Contiene 4 programas:

Modo A, este programa infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 1 y desinfla la 1 cuando se infla la 2, así sucesivamente de una extremidad a otra, subiendo de los pies a los brazos de manera progresiva, con un tiempo de llenado por zona de 11seg. y de reposo de 11seg., esto proporciona una agradable sensación de drenaje suave. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa.

Modo B, este programa infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 2 y desinfla la 1 cuando se infla la 3, y así va subiendo progresivamente de un lado al otro, con un tiempo de llenado de 11seg, luego aumenta la presión en todo el cuerpo. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa. La sensación de presión es un poco más intensa y profunda, utilizado generalmente para tratamientos de celulitis edematosa, grasa o retención de líquidos, edemas.

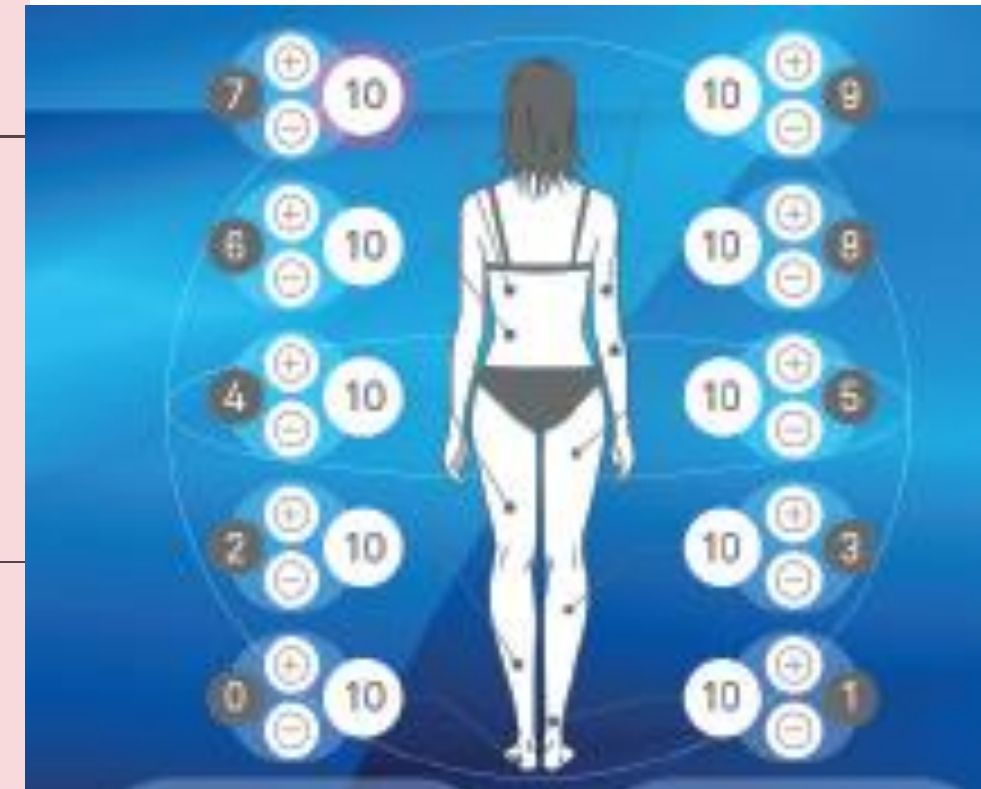




Modo C, este tipo de programa infla de la zona 0 a la 9. Empieza a inflar por la zona 0 y añade la zona 1, seguido de la 2 y así sucesivamente va añadiendo zonas al proceso de inflado, la presión de aire no se va perdiendo de forma simultánea como en los modos anteriores, luego hay un tiempo de reposo de 11seg. y al final, repite el programa. Ejerce una presión mucho más intensa, concentrada en abdomen y muslos. Se recomienda para clientes con celulitis o grasa localizada más densa en muslos y abdomen.

Modo D, El programa D infla las tres zonas a la vez: piernas, abdomen y brazos desde la extremidad hasta la parte superior. Es un modo mucho más intenso, concentrado en abdomen y brazos. Recomendada para la pesadez abdominal y retención de líquido a nivel de brazos.

Se puede trabajar zonas independientes sin utilizar ningún programa, el equipo permite escoger cada parte del traje y regular el tiempo de llenado de aire de la zona a tratar independientemente. Solamente debe pulsar el botón de la zona y regular la intensidad por medio de las teclas “+” y “-“ de 0 15.

Modo de tratamiento

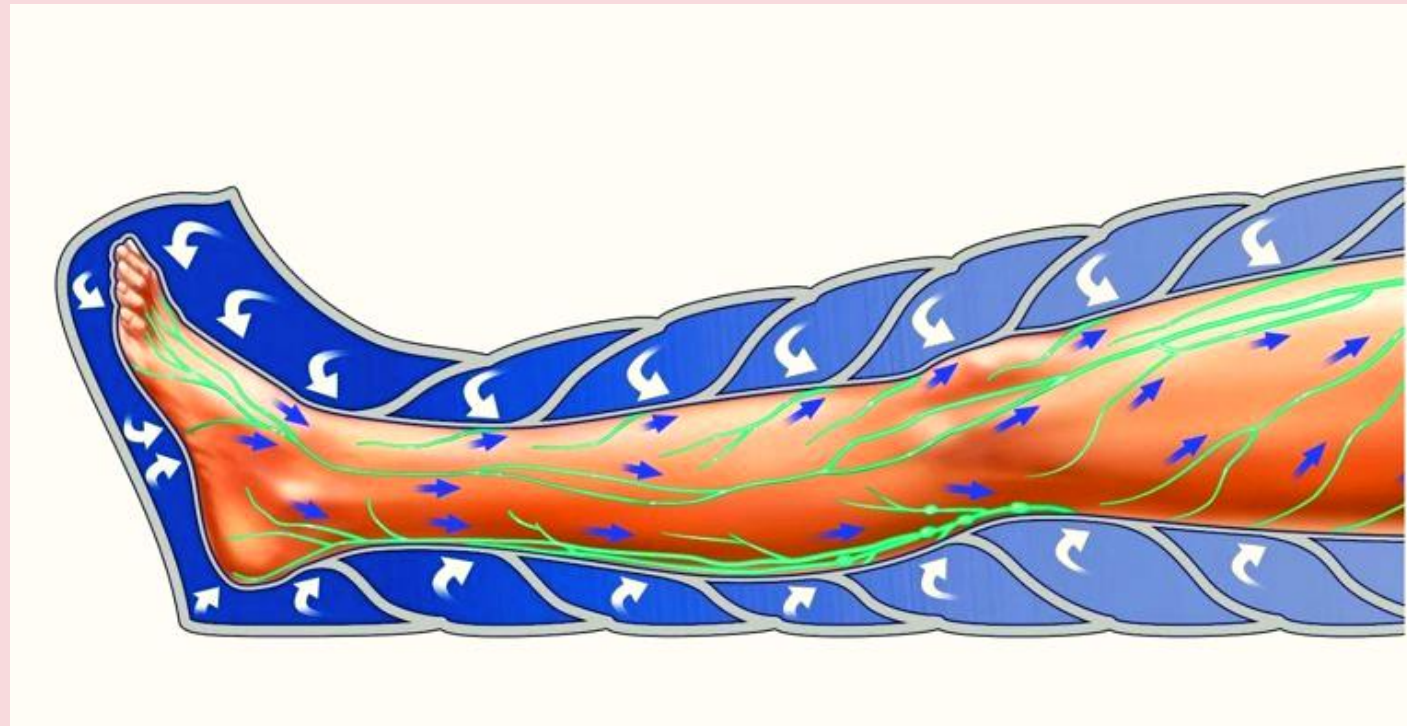

La aplicación de presión de aire, que estimula el retorno venoso de sangre al corazón, da como resultado aumento de la circulación sanguínea y linfática, además de tener un efecto relajante, y térmico que produce el equipo.

El cliente deberá estar decúbito supino tendido en la camilla y procederemos a colocarle los diversos dispositivos y cubrir las zonas, ya sean pies, piernas, cintura o brazos. Esto según el protocolo seleccionado, distribuirá la presión de aire controlada de forma ascendente en las partes del cuerpo a tratar.

Mantenga la comunicación con el cliente durante el tratamiento, para ajustar la temperatura, la presión y el tiempo.

La termoterapia

Este equipo nos permite además tener la función de termoterapia, que no es más que el tratamiento corporal mediante el uso de calor. Este se utiliza para activar la circulación general, acelerar el metabolismo de las grasas, producir alivio de dolores musculares, y relajación. La temperatura corporal irá aumentando a consecuencia de una mayor temperatura generada por el equipo (temperatura máxima del equipo es de 55 °C), y con ella se logra aplicar un efecto terapéutico y relajante. A medida que el cuerpo se calienta, además de sudar, se produce un aumento la velocidad a la que circula la sangre, y de esta manera se acelera el metabolismo, mientras que el cuerpo intenta enfriarse. Cuenta con 5 zonas de tratamiento que permiten regular la temperatura de forma independiente que se puede graduar de 0 a 62.

Modo de aplicación



- Conectar correctamente los tubos en el panel trasero, es importante seguir las indicaciones numéricas. Los cables finos del 1 al 5 son para la función termoterapia y los cables gruesos del 0 al 9 son para la presoterapia.
- Es importante colocar la manta con los cables en una superficie plana para que el paciente pueda tumbarse.
- Proteja la manta con un papel desechable para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.
- Envuelva y ajuste las prendas alrededor del cuerpo del usuario. Recuerde utilizar un traje desechable debajo del traje de la presoterapia.
- Encendemos el equipo, y seleccionamos el tratamiento a realizar, **presoterapia** o **termoterapia**, y su intensidad.
- La presión del equipo es de 20-40KPa, 25-40L/m.

Indicaciones



- Tratamiento de retención de líquido, edemas y linfedemas.
- Tratamiento de eliminación de grasas y toxinas.
- Tratamiento de piernas cansadas.
- Coadyuvante en tratamientos para la disminución de grasa localizada.
- Tratamientos para mejorar la circulación en pacientes con hipertensión y diabetes.
- Ayuda a mejorar el aspecto de piel de naranja.
- Tratamiento y prevención de signos varicosos.
- Estimulación circulatoria.
- Recuperación de la circulación linfática post operatoria.
- Tonificación muscular
- Oxigenación del organismo.

Contraindicaciones

Por ser un tratamiento muy controlado, son pocas las contraindicaciones, sin embargo, es importante consultar al profesional médico-estético antes de realizarlo.

- Problemas cardiovasculares severos.
- Flebitis.
- Enfermedades infecciosas.
- Enfermedades de la piel y posibles infecciones activas.
- Enfermedades inmunodeficientes o pacientes oncológicos.
- Problemas hormonales.
- En mujeres embarazadas, sólo pueden tratarse piernas y brazos, en presión de aire muy baja y siempre bajo prescripción médica.
- No puede utilizarse en personas con epilepsia, marcapasos o cualquier condición psicológica o médica grave.
- No es recomendable utilizar en personas con problemas de claustrofobia.

Advertencias

- Es importante tener la precaución de no apretar demasiado el traje al cuerpo del cliente, para evitar hacerle daño si la presión del aire es muy fuerte, la regulación de la presión siempre será a tolerancia.
- Si el traje está roto o envejecido, por favor, sustitúyalo por uno nuevo, para evitar quemaduras accidentales de la piel o descargas eléctricas.
- Compruebe con el cliente a lo largo del tratamiento que la temperatura es la adecuada.
- Se recomienda que el cliente beba mucha agua antes y después del tratamiento.
- Utilice un protector de celulosa bajo el traje de presoterapia para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.
- No deje el traje calentándose sin ningún paciente dentro.
- No coloque ningún líquido en el equipo.
- Tenga cuidado con las conexiones eléctricas.
- Por favor, desmonte y monte el equipo por personal profesional.
- En caso de malfuncionamiento del aparato compruebe cuidadosamente todas las conexiones y contacte con un servicio técnico en caso de duda.

Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com



Welcome to  weelko